

1 **PRODOTTO:** MAXINEB KIT PER AEROSOLTERAPIA

Codice CND R03010380 - SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA - ACCESSORI
Codice RDM 171943/R

GAMMA 032-10-003 MaxiNeb Ampolla
032-10-004 MaxiNeb Ampolla con Raccordo a T e Boccaglio
032-10-005 MaxiNeb Ampolla con Raccordo a T, Boccaglio e Tubetto
032-10-007 Maschera aerosol adulti con ampolla MaxiNeb e Tubetto
032-10-007NC Maschera aerosol adulti con fermaglio naso, Ampolla MaxiNeb e Tubetto
032-10-011 Maschera aerosol pediatrica con Ampolla MaxiNeb e Tubetto

IMMAGINE:



DETTAGLI DI SPECIFICA/MISURA

- **Latex Free**
- Ampolla medica a elevato volume di 15ml, che permette un alto livello di diluizione del medicinale quando richiesto.
- Scala graduata sull'ampolla, per aiutare la diluizione del medicinale.
- Basso spazio morto (1.1ml)
- Tappo anti traboccamento a larga capacità (10 ml).
- Nebulizza nelle posizioni fino a 45° di inclinazione dalla verticale
- Perfetta tenuta con ¼ di giro di chiusura del tappo.

Output

	MMAD (micron)*	% tra 1-5 micron
MaxiNeb	4.18	56.42

* MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter - diametro aerodinamico medio di massa

- Varianti con Maschera- Morbida maschera in PVC incolore/ trasparente che permette l'ispezione visiva.
- Connettore girevole angolato con raccordo 22 mm maschio conforme alla ISO 5356-1
- Disponibili varianti con Tubo Ossigeno – 2.1 m di lunghezza
- Tubetto– profilo antischiacciamento per prevenire il blocco accidentale del flusso di ossigeno.

DESCRIZIONE/
DESTINAZIONE
D'USO Il kit per aerosolterapia Flexicare MaxiNeb è progettato per convertire medicinale liquido in aerosol da somministrare ai pazienti tramite inalazione, per il trattamento di patologie respiratorie.

Utilizzabili in ospedale, pronto soccorso, a casa da personale addestrato.
Utilizzabile per l'automedicazione da parte del paziente.

UTILIZZO
MONOPAZIENTE I kit per aerosolterapia Flexicare MaxiNeb sono dispositivi medici monopaziente per singolo trattamento. Se ne raccomanda l'utilizzo per il periodo massimo di un mese.

MATERIALI

Maschera Facciale	- PVC
Connettore Girevole Angolato	- Polipropilene
Molletta Naso	- Alluminio
Fascia elastica	- Elastico Latex Free
Tubetto	- PVC
Boccaglio	- Polipropilene
Tappo dell'Ampolla	- Polipropilene
Corpo dell'Ampolla	- Stirene
Pisper dell'Ampolla	- Stirene

COLORE Maschera Incolore,
Ampolla Incolore – Tappo Blu

2. CONFEZIONAMENTO:

DESCRIZIONE Il kit completo MaxiNeb con gli accessori è confezionato in un sacchetto stampato e sigillato. I sacchetti sono etichettati singolarmente. La confezione multipla di 50 pezzi è fornita in cartone Flexicare.
La confezione multipla è munita di etichetta.

MISURE IMBALLO	Codici	Numero Pezzi	Dimensioni (m)	Peso (kg)
	032-10-003	50	0,385x0,190x0,315	1,6
	032-10-004	50	0,350x0,300x0,350	3,1
	032-10-005	50	0,350x0,300x0,350	4,7
	032-10-007	50	0,350x0,300x0,350	6,1
	032-10-007NC	50	0,350x0,300x0,350	6,2
	032-10-011	50	0,350x0,300x0,350	5,2

Flexicare Medical Ltd is an ISO 13485 / CE mark registered company and is registered with the FDA.

Distributore:



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY –
Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Società soggetta all'attività di direzione coordinamento di Air Liquide
Santé International S.A.
Web Site: <http://www.airliquidemedicalsystems.it>