


Pre-Mold Splint

Cod. CND M030549


Splint preformati per immobilizzazione in fibra di poliestere




MANO

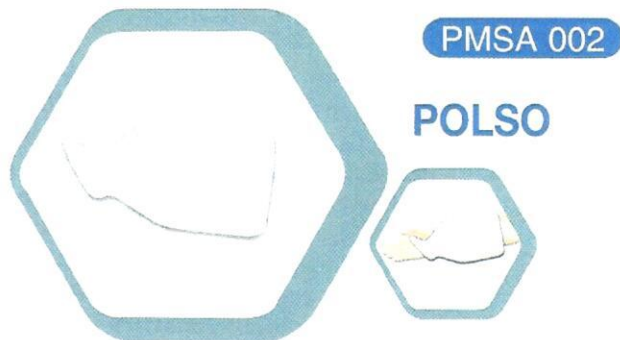

POLSO

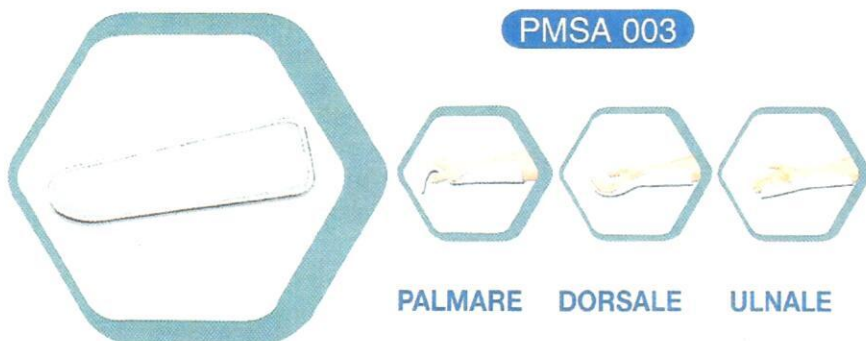


PALMARE DORSALE ULNALE

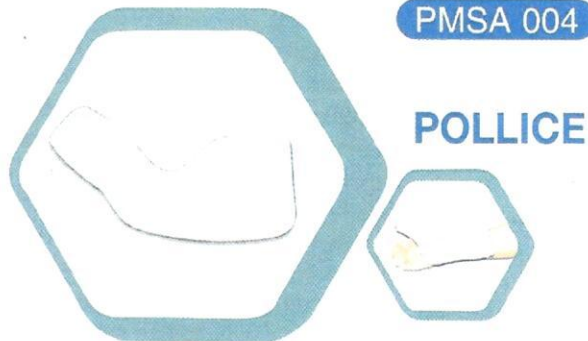

POLLICE



GOMITO

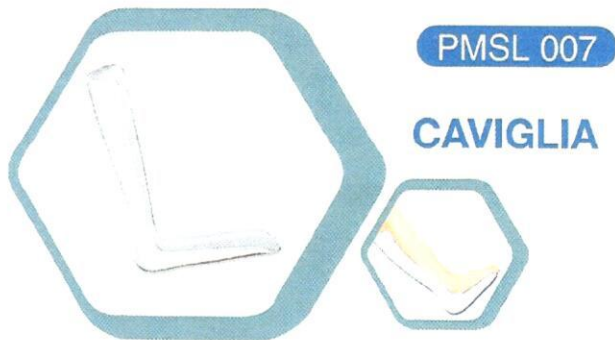

CAVIGLIA



GINOCCHIO



GAMBA

CE
Classe I

Modalità d'impiego:

Pre-mold-splint è una stecca in fibra di poliestere preimbottita e preformata per il trattamento primario e l'immobilizzazione delle estremità infortunate. Pre-mold-splint può essere applicato senza l'utilizzo di guanti e prebendaggio e ciò rende l'utilizzo rapido e semplice.

Indicazioni:

Fratture, lussazioni e distorsioni



Istruzioni per l'uso: (CLASSE I)

- 1 Aprire la confezione dove indicato ed estrarre la stecca.
- 2 Immergerla in acqua tiepida (20°-30° per 10 secondi)
- 3 Strizzarla per togliere l'acqua
- 4 Stendere la stecca su un panno asciutto. Arrotolarla e strizzarla per eliminare l'acqua in eccesso.
- 5 Posizionarla sull'arto da immobilizzare e fissarla con un bendaggio.
- 6 Tenere l'arto in posa per circa 2 minuti. La stecca è completamente rigida in 20 minuti.

CODICE	MISURA	CONFEZIONE
PMSA-001	CM. 18 X 30	20 PZ
PMSA-002	CM. 16,5 X 30,5	20 PZ
PMSA-003	CM. 15,5 X 43	20 PZ
PMSA-004	CM. 15 X 32,5	20 PZ
PMLA-005	CM. 19,5 X 73	20 PZ
PMSL-007	CM. 30 X 79,5	20 PZ
PMLL-008	CM. 33 X 74	20 PZ
PMLL-009	CM. 30 X 116	20 PZ

"Prodotto monouso
conservare in luogo asciutto a 24 gradi"