



MONOCLEAN TYPE 10

Cuffia shampoo di uso rapido ed efficace non richiede asciugatura. Imbustata singolarmente.

Uso:

1. Inserire tutti i capelli all'interno della cuffia.
2. Massaggiare delicatamente la cute per uno o due minuti.
3. Togliere la cuffia e, se necessario, togliere lo shampoo extra utilizzando Monoclean Type 2.
4. Pettinare come di consuetudine.
5. Se necessario inserire la confezione aperta contenente la sola cuffia nel forno a microonde a 700 watt per 10 secondi, controllare la temperatura prima di posizionarla sul paziente per evitare ustioni al cuoio capelluto.

Controindicazioni: Non usare in caso di allergie ai singoli componenti, evitare il contatto con la parte interna dell'occhio. Non ingerire.

Conservazione e trasporto: In luogo asciutto e a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a fonti di calore

Tossicità: Il prodotto non è tossico per l'uso per cui è destinato.

Smaltimento: Smaltire come rifiuto solido urbano.

Materiale della cuffia

- 100% pellicola morbida in PEVA
- Non tessuto a nido d'ape (100% Rayon)

Diametro della cuffia cm 29

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876

Composizione del gel lavante

• Isotearamidopropyl - Morfoline laccata - Disodium cocamidopropylacetate - DMDM Hydantoin - Hamamelis pura – Fenossietanolo - Metilparaben – Butilparaben – Etilparaben – Propilparaben - Simecone - Profumo delicato -Eccipiente acquoso

- ❖ Il gel Ph 5,5 mantiene e protegge il manto acido dell'epidermide.
- ❖ ANALLERGICA
- ❖ LATEX FREE

Confezione standard:

1 cuffia per busta – cartone da 48 cuffie imbustate singolarmente

GIEMME
Italia