

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876



ENDOMAT PLUS

Sistema per trattamento chimico-termico di strumenti di strumenti in lava-endoscopi

Disinfettante per strumenti sulla base di una formulazione classica di aldeide per la disinfezione chimico-termica di strumenti in macchine lava-endoscopi automatiche a temperature di 50-55° (in caso di temperatura stabile nella macchina, anche fino a 60°C).

Azione rapida ed estesa a bassissime concentrazioni d'uso

Endomat Plus

- Ottima azione detergente
- Azione battericida, fungicida, microbattericida, inattivante di HBV/HIV
- Molto economico
- Ottima compatibilità con i materiali degli strumenti
- Nessuna formazione di schiuma
- Basso grado d'inquinamento dell'aria

Impiego:

Endomat Plus è un concentrato. Il dosaggio avviene tramite le apposite pompe presente nelle lava- endoscopi automatiche.

Concentrazione d'impiego: 1% / 5 min.

Composizione:

3,5 g gliossale

5,25 g formacetale

4,25 g glutaraldeide

1,9 g composto quaternario di ammonio

GIEMME
Italia

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876

Dati chimico-fisici:

Aspetto del concentrato: leggermente giallo, trasparente

Densità a 20°C: ca. 1,036 g/cm³

Valore pH: ca. 5

Coefficiente di ripartizione a 20°C: 1,365 – 1,375

Tipo di preparato:

LABOMAT E ed **ENDOMAT PLUS** costituiscono un sistema per il trattamento chimico-termico di strumenti termolabili in macchine lava-endoscopi. In particolare possono essere trattati endoscopi rigidi e flessibili nonché accessori in tutte le comuni macchine lava-endoscopi automatiche ad una temperatura compresa tra 50-60°C.

1. Prelavaggio:

In base al grado di sporco degli endoscopi occorre effettuare un prelavaggio a freddo secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di endoscopi. Vanno impiegati solo detersivi idonei. Noi consigliamo

il detersivo enzimatico INSTRU ZYM. Per un'azione disinfettante e detersivo insieme devono essere usati solo preparati contenenti aldeidi. Noi consigliamo INSTRU PLUS ed INSTRU PLUS N.

2. Trattamento chimico-termico:

La pulizia a macchina ha luogo con il detersivo enzimatico LABOMAT E. La disinfezione a macchina

avviene con il disinfettante ENDOMAT PLUS. I dosaggi sono fatti dalle apposite pompe esistenti nelle macchine lava-endoscopi automatiche. Come temperatura per l'acqua di alimentazione si consigliano 35-40°C. Temperature più elevate possono provocare delle coagulazioni.

Temperature molto al di sotto di 35°C possono generare una formazione di schiuma.

Si consiglia di effettuare il risciacquo finale con acqua demineralizzata.

Formato di fornitura: CE 0197

3 taniche da 5 l / cartone

GIEMME
Italia