

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia S.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876



LABOMAT E

Sistema per trattamento chimico-termico di strumenti di strumenti in lava-endoscopi

Detergente enzimatico per il trattamento chimico-termico in macchine lava-endoscopi automatiche.

- Pulisce a fondo senza danneggiare i materiali
- Molto economico
- Ottima degradabilità

Impiego

Labomat E è un concentrato. Il dosaggio viene fatto dalle apposite pompe esistenti nella macchine lava-endoscopi automatiche.

Concentrazione d'impiego: 0,5%.

Composizione:

Proteasi, amilasi, tensioattivi, coadiuvanti di solubilità, glicoli, conservanti, prodotti stabilizzanti e ausiliari.

Dati chimico-fisici:

Aspetto: leggermente giallo, trasparente


Densità a 20°C: 1,036 - 1,042 g/cm³

Valore pH ca. 6

Labomat E va conservato in ambiente fresco.

Forme di fornitura: CE

3 x 5 L in taniche / cartone

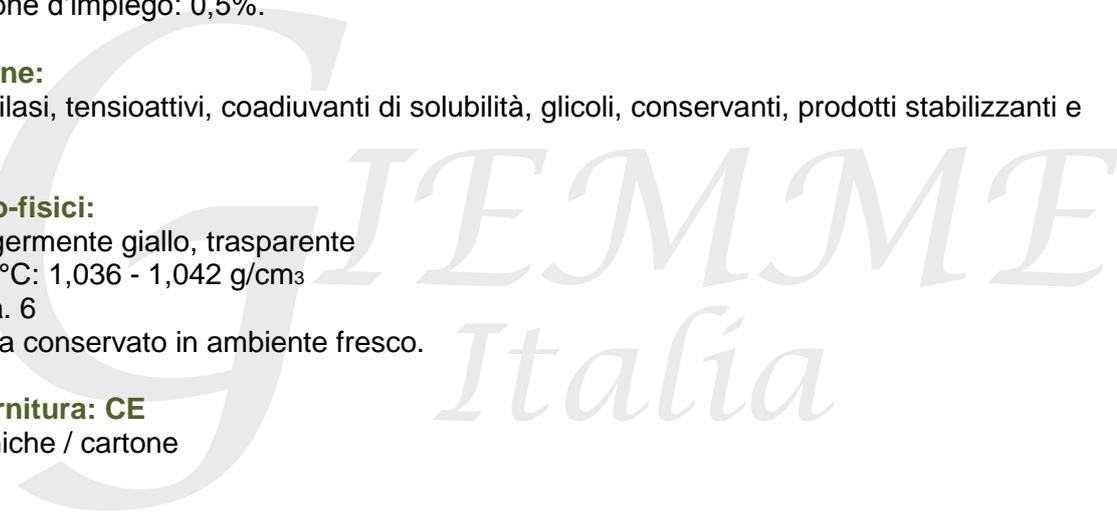

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

Osservazione:

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Tipo di preparato:

LABOMAT E ed **ENDOMAT PLUS** costituiscono un sistema per il trattamento chimico-termico di strumenti termolabili in macchine lava-endoscopi. In particolare possono essere trattati endoscopi rigidi e flessibili nonché accessori in tutte le comuni macchine lava-endoscopi automatiche ad una temperatura compresa tra 50-60°C.

1. Prelavaggio:

In base al grado di sporco degli endoscopi occorre effettuare un prelavaggio a freddo secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di endoscopi. Vanno impiegati solo detergenti idonei. Noi consigliamo il detergente enzimatico INSTRU ZYM. Per un'azione disinfettante e detergente insieme devono essere usati solo preparati contenenti aldeide. Noi consigliamo INSTRU PLUS ed INSTRU PLUS N

2. Trattamento chimico-termico:

La pulizia a macchina ha luogo con il detergente enzimatico LABOMAT E. La disinfezione a macchina avviene con il disinfettante ENDOMAT PLUS. I dosaggi sono fatti dalle apposite pompe esistenti nelle macchine lava-endoscopi automatiche. Come temperatura per l'acqua di alimentazione si consigliano 35-40°C. Temperature più elevate possono provocare delle coagulazioni. Temperature molto al di sotto di 35°C possono generare una formazione di schiuma. Si consiglia di effettuare il risciacquo finale con acqua demineralizzata.

GIEMME
Italia